



FIȘA TEHNICĂ nr. 4/31.01.2018

Ed.1/Rev.2/28.10.2018

Denumire produsului: KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE

Alte denumiri comerciale: KLIN WIPES, QUAT WIPES, VET WIPES, QUIK WIPES

Caracteristici fizico-chimice:

ASPECT:	servetele impregnate
CULOARE:	transparent
MIROS:	parfum
Ph:	10± 1
SOLUBILITATE:	completă în orice proporție
CARACTER CHIMIC:	cationic
BIODEGRABILITATE:	> 90%
TERMEN DE VALABILITATE:	3 ani de la data fabricației



Domeniul de aplicare: KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE sunt folosite pentru curatarea si dezinfectarea:

- *suprafetelor* – domeniul medical/industrial/institutional/casnic/ colectivitati
- *instrumentarului* – domeniul medical

Utilizarea substanței/preparatului: curatarea si dezinfectia suprafetelor de lucru, a obiectelor de inventar, instrumentarului din spatii private si zone de sănătate publică. Se poate utiliza pentru dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum medicale. Se utilizeaza in domeniul medical, public, privat, institutional.

Necesita clatire daca se dezinfecteaza instrumentarul invaziv sau suprafetele ce iau contact direct cu pacientul. Acest produs este destinat pentru uz profesional, industrial si casnic și se va folosi dupa citirea instructiunilor de utilizare in cazul personalului nespecializat.

Tip produs biocid: GRUPA PRINCIPALA I, TP 2 - Dezinfectant de nivel inalt.

Servetelele sunt impregnate cu o soluție cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfectia. Substanțele active sunt sărurile cuaternare de amoniu.

Compoziția chimică la 100 g produs:

Substanța activă:

- 0,34g Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5 , CE: 230-525-2 ,
- 0,09g Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4

Alte ingrediente: surfactanti nonionici, agent de chelatizare, emulsifianți, parfum și apă.



Activitate biocida și standarde:

KLINTENSIV® SERVETELI UMEDE DEZINFECTANTE			AVIZ NR. 2394BIO/02/12.24		
Activitate biocida	Standard	Condiții testare	Organism testat	Concentrație	Timp contact
Bactericida	SR EN 1276	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC 6538	ca atare	5 minute
			Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442		
			Escherichia coli ATCC 10536		
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
Bactericida	SR EN 13697	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC 6538	ca atare	5 minute
			Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442		
			Escherichia coli ATCC 10536		
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
Bactericida	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC 6538	ca atare	5 minute
			Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442		
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
			Staphylococcus aureus ATCC 6538		
Bactericida	SR EN 14561	Murdarie	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	ca atare	15 minute
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
			Staphylococcus aureus ATCC 6538		
			Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442		
Fungicida	SR EN 13624	Curătenie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	5 minute
Fungicida	SR EN 13697	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	30 minute
Fungicida	SR EN 14562	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	60 minute
Leverucida	SR EN 1650	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 13624	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 13697	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 14562	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	10 minute
Sporicida	SR EN 13704	Curătenie	Bacillus subtilis ATCC 6633	ca atare	60 minute
Micobactericida/Tu berculocida	SR EN 14348	Murdarie	Mycobacterium avium ATCC 15769	ca atare	60 minute
			Mycobacterium terrae ATCC 15755		
Virucida	SR EN 14476+A1	Murdarie	Poliovirus type 1	ca atare	5 minute
			Murine Norovirus		
			Adenovirus type 5		

Indicații de utilizare:

Domeniul de utilizare - unitati sanitare				
Metoda de aplicare	Concentratie	Utilizare	Eficacitate biocida	Timp actiune
Prin stergere	Ca atare	Suprafete	Bactericid, fungicid, leverucid,	5 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid,	60 minute
		Instrumentar	Virucid	5 minute
			Leverucid	10 minute
			Bactericid	15 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid,	60 minute
Domeniul de utilizare - industrial, casnic				
Prin stergere	Ca atare	Suprafete	Bactericid, fungicid, leverucid,	5 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid,	60 minute

Mod de utilizare :

- **Suprafețe:** Se șterge suprafața care se dorește a se dezinfecta și se lasă să acționeze timp de 5-60 minute, în funcție de nivelul de dezinfecție dorit. Nu se clătește.
- **Instrumentar:** Se șterge instrumentarul/suprafața instrumentarului care se dorește a se dezinfecta și se lasă să acționeze timp de 5-60 minute, în funcție de nivelul de dezinfecție dorit. Pentru instrumentarul invaziv, curățarea/dezinfecția este urmată clătire cu apă pură microbiologic.



Timp de acțiune: 5 minute – dezinfectie de nivel mediu și scăzut; 60 minute – dezinfectie de nivel înalt.

Ambalare: pachet cu 10, 12, 15, 20, 24, 32, 45, 50, 60, 64, 72, 80, 100, 120, 200 servetele

Transport, livrare, depozitare: KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între +5°C la +30°C.

Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

Precauțiuni de utilizare:

Lipiti sigiliul după fiecare deschidere a pachetului, pentru a se păstra toate proprietățile produsului.

Fraze de pericol (H) :

H302 Nociv în caz de înghițire



GHS07



GHS09

Atentie !

Fraze de precauție (P) :

P261 Evitați să inspirați Praful/fumul/gazul/ceata/vapori/spray-ul

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 Colectați scurgerile de produs