

# 30 sec Quick Wipes ANIOS

Spectru larg de  
EFICIENTA



- Servetele dezinfectante pentru dispozitivele medicale neimersibile
- Fara clatire
- Pe baza de etanol
- Spectru larg de activitate in timp scurt
- Formula fara aldehida, fara coloranti
- Parfum placut

## INDICATII

Servetele ANIOS QUICK WIPES sunt impregnate cu o solutie dezinfectanta cu actiune rapida pentru dispozitivele medicale neimersibile, curatate in prealabil si rezistente la alcool (stetoscoape, cabluri si conectori, senzori de presiune, testere de glicemie ...).

## COMPOZITIE

Solutia de impregnare : Ethanol (55%),  
Propionat de amoniu cuaternar, parfum.

## CARACTERISTICI

- Compozitie : celuloza, vascoza, liant acrilic
- Dimensiune servetele: 130 x 190 mm
- Solutia de impregnare : 1,9ml de ANIOSPRAY QUICK per servetel

## PROPRIETATI FIZICO - CHIMICE

Solutia de impregnare a ANIOS QUICK WIPES este :

- Limpede, incolora
- Parfum : ceai de lamaie
- Densitate la +20°C :  $\approx 0,9$
- pH : 5.75 +/- 0.25

# ANIOS Quick Wipes

## MOD DE UTILIZARE

- Aplicati servetelul pe dispozitivul medical curatat in prealabil.
- Respectati timpul de contact indicat pentru activitatea antimicrobiana dorita.
- Clatirea nu este necesara decat in cazul in care dispozitivul medical vine in contact cu pielea sau cu mucoasele. Inchideti bine ambalajul dupa fiecare deschidere.

Nu reutilizati servetelele. Dezinfectia nu va mai putea fi garantata.

Observatii : Verificati, inainte de aplicare, compatibilitatea dispozitivelor medicale tratate cu alcoolul.

Aparatele electrice ce urmeaza a fi dezinfectate trebuie scoase de sub tensiune.



## PROPRIETATI MICROBIOLOGICE

Solutia de impregnare este :

Activa pe	Norme europene	Timpi de contact
Bacterii	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. SARM conform EN 14561	30 secunde
Micobacterii	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	30 secunde
	Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	5 minute
Levuri	Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697.	30 secunde
Fungi	Tricophyton mentagrophytes conform EN 14562	30 secunde
	Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697.	5 minute
Virusi	Adenovirus, HIV-1, PRV (virus model HBV), BVDV (virus model HCV), Vaccinia virus Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H <sub>1</sub> N <sub>1</sub> )	30 secunde
	Calicivirus Felin MNV conform EN 14476	5 minute

## PRECAUTII DE UTILIZARE

Periculos – respectati precautiile de utilizare (stabilite conform normelor europene in vigoare privind clasificarea si etichetarea produselor chimice).

Depozitare intre +5°C si +25°C.

Dispozitiv medical de Clasa IIb (Directiva 93/42/CEE modificata).

## MOD DE AMBALARE

Bax de 12 cutii distribuitoare de 120 servetele de 130 x 190 mm.....Réf : 2333.421

