

# ANIOSPRAY QUICK

## Dezinfectant pulverizabil


### INDICAȚII:

**ANIOSPRAY QUICK** este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate în prealabil și rezistente la alcool.

### MOD DE UTILIZARE:

Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. ANIOSPRAY QUICK poate fi utilizat cu un pulverizator manual.

Pulverizați uniform pentru obținerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.

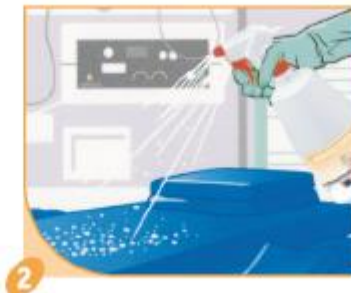

### COMPOZIȚIE CALITATIVĂ:

Soluție hidroalcoolică (etanol 55%)

Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (0,1%)

### PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE:

Produs gata de utilizare; Soluție incoloră, fără miros; Densitatea 0,9 ; pH – ul produsului la +20° C ~ 5,5;

Stocare: între 5 - 25 °C

### PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

**ANIOSPRAY QUICK** este un produs fabricat conform următoarelor norme de eficacitate antimicrobiană:

#### Bactericid:

SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA – 30 de secunde

#### Micobactericid

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium terrae* – 30 de secunde

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium avium* – 5 minute

#### Fungicid

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Candida albicans* – 30 de secunde

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Aspergillus niger* – 5 minute

Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 – 30 de secunde

### PRECAUȚII LA UTILIZARE:

Citiți fișa de securitate și eticheta. „Inflamabil” - respectați precauțiile de utilizare stabilite de Directiva Europeană 99/45/CE.

APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual.

Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clătiți imediat cu multă apă. În caz de ingerare consultați de urgență un medic, arătându-i eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PREZENTARE: Cutie de 12 flacoane de 1L; Cutie de 4 bidoane de 5 L.

## ANIOSPRAY QUICK

### Proiect de eticheta

**INDICAȚII:** ANIOSPRAY QUICK este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate în prealabil și rezistente la alcool.

**MOD DE UTILIZARE:** Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. ANIOSPRAY QUICK poate fi utilizat cu un pulverizator manual. Pulverizați uniform pentru obținerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.

**COMPOZIȚIE CALITATIVĂ:** Soluție hidroalcoolică (etanol 55%); Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (0,1%)

**PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE:** Produs gata de utilizare; Soluție incoloră, fără miros; Densitatea 0,9 ; pH – ul produsului la +20° C ~ 5,5; Stocare: între 5 - 25 °C

**PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:** ANIOSPRAY QUICK este un produs fabricat conform următoarelor norme de eficacitate antimicrobiană:

**Bactericid:** SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA – 30 de secunde

**Micobactericid** SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium terrae* – 30 de secunde; SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium avium* – 5 minute

**Fungicid** : SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Candida albicans* – 30 de secunde; SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Aspergillus niger* – 5 minute

**Virucid** : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 – 30 de secunde

**CLASIFICAREA PREPARATULUI:** Acest preparat a fost clasificat conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor sale.



GHS07



GHS02

Pictograme de pericol:

Cuvânt de avertizare : PERICOL

**Fraze de pericol** : H226 Lichid și vapori inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Fraze de precauție - Generale** : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Fraze de precauție - Prevenire** : P210 A se feri de scântei și flăcări expuse. Fumatul interzis. P261 A se evita respirarea produsului pulverizat. P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 A se purta mănuși de protecție.

**Fraze de precauție - Intervenție** : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți.

**Fraze de precauție - Depozitare** : P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

**Fraze de precauție - Eliminare** : P501 Produsul neutilizat și ambalajul său trebuie îndepărtate ca deseuri periculoase.

**APARAT DE PULVERIZARE:** Pulverizator manual. Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clățiți imediat cu multă apă. În caz de ingerare consultați de urgență un medic, arătându-i eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**PREZENTARE:** Cutie de 12 flacoane de 1l; Cutie de 4 bidoane de 5 l.

**CE 0459**



**S.C. GB INDCO S.R.L.**

Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. a, Ap. 5, S4, București Tel: 021.336.12.12 / Fax: 021.336.38.87  
e-mail: [contact@gbindco.ro](mailto:contact@gbindco.ro) (reprezentant și importator unic autorizat al Laboratoires ANIOS / Franța)