

SURFANIOS Premium

Detergent dezinfectant
Pentru sol si suprafete



- Dubla actiune: combinație de detergent și dezinfectant în cadrul unei operații simultane
- Activitate împotriva bacteriilor și mucegaiurilor izolați din mediul spitalicesc
- Aldehyde free product
- Optimizarea informațiilor ecotoxicologice


INDICATII

Cleaning and disinfection of floors, walls, medical equipment and non-invasive medical devices.

CARACTERISTICI

- Solutie deculoare verde
- pH produs pur: 11.2
- pH produs diluat (0.25%): aprox 8
- Densitate: 1.007
- Indice de refractie: 1.3587


PRODUSUL
TRBUIE DILUAT
20ml > 8L

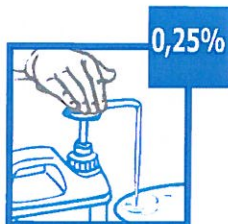


SURFANIOS Premium

Detergent dezinfectant pentru sol și suprafețe


INSTRUCIUNI

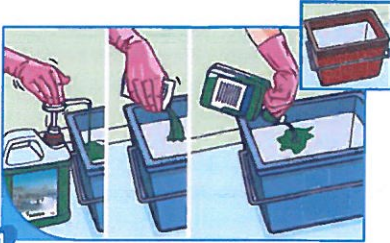

Umpleți o găleată de spălat și o găleată de clătire cu 8 litri de apă. Diluție **0.25 %**: Se toarnă o doză de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM în galeata de spălat.

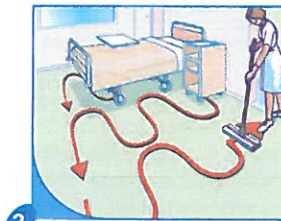

Continuați să curățați respectând direcția: din spate spre ieșire. Clătirea nu este necesară decât dacă zonele de tratament vin în contact cu pielea sau mucoasa.

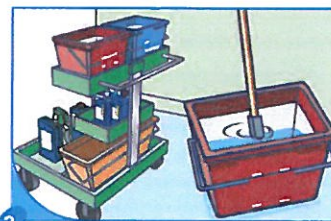

Clătiți și stoarceți capul mopului înainte de a fi înmuiat în galeata de spălat. (Nu introduceți căruciorul de curățare în încăpere; trebuie să rămână pe coridor).



Înlocuiți capul de perie după curățarea fiecărei zone și schimb soluția de spălare și clătire. Așezați capul de mop murdar în recipientul furnizat

COMPOZITIE

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), didecildimethylammonium chloride – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipienti.

PRECAUTII DE UTILIZARE

Pericol – respectați precauțiile de utilizare (întocmite în conformitate cu normele europene în vigoare privind clasificarea și etichetarea produselor chimice). Utilizați produsele biocide cu prudență. Înainte de fiecare utilizare, citiți eticheta și informațiile referitoare la produs. Stocare între +5°C și +35°C. Produs biocid utilizat pentru dezinfectarea suprafețelor (Groupa 1-PT 2-4) și dispozitiv medical clasa IIa - rezervat pentru uz profesional.

AMBALARE

SURFANIOS Premium

- 1 500 doze, 20 mlRef. 1917.129
- 2 12 flacoane, 1LRef. 1917.092
- 3 4 bidoane 5 litri cu 1 pompa dozatoare de 20 ml....Ref. 1917.036

PROPRIETATI MICROBIOLOGICE

Activ pe	Standard	Timp de contact
Bacterii	EN 1040, EN 13727, EN 1276	5 min. /0.25%
	EN 13697	30 min. /0.25%
	EN 16615	15 min. /0.5%
	MdRB conform EN 1276	5 min. /0.1%
	MdRB conform EN 13697	15 min. /0.25%
Micobacterii	Mycobacterium terrae EN 14348, EN 14563	60 min. /0.25% 30 min. /0.5%
	Levuri	EN 1275, EN 13624, EN 1650
EN 13697		30 min. /0.25%
		15 min. /0.5%
Fungi	EN 1275	15 min. /0.25%
	EN 1650	120 min. /0.25%
	EN 13697	30 min. /0.5%
Virusi	HIV-1, PRV, BVDV, HSV, Rotavirus, Vacciniavirus	5 min. /0.25%
	Coronavirus	15 min. /0.25%
	Norovirus MNV	60 min. /1%
	Adenovirus	30 min. /1%

Toată activitatea antimicrobiană a produsului este inclusă în documentația științifică disponibilă la cerere

