

VIROSPRAY

DETERGENT DEZINFECTANT
SPORICID

TRATAREA SUPRAFETELOR DM



SPRAY

BENEFICIILE PRODUS

- Curățare și dezinfectare dispozitive medicale, instrumente
- Activitate dezinfectantă de nivel înalt*

- Curățarea și dezinfectarea suprafețelor în contact cu alimentele urmate de clătire (cu apă)
- Activ pe *Clostridium difficile* (soluție impregnată)

FARA
AMONIU
CUATERNAR

* vezi proprietățile dezinfectante pe verso

Fb **Franklab**[®]
notre expertise l'Ultra-Propreté



CE
0459

USE



www.sterifrance.com

MANUAL
TREATMENT

• INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Prima utilizare a spray-ului:

- Purtați echipament individual de protecție adecvat și deblocați spray-ul

Utilizare:

- 1- Pulverizați VIROSPRAY uniform pe un șervețel uscat nețesut de unică folosință
- 2- Ștergeți suprafața dispozitivului medical de tratat
- 3- Timp de contact: În funcție de activitatea antimicrobiană dorită
- 4- Nu clătiți *

* Nu necesită clătire, cu excepția cazului în care se specifică altfel de către producătorul stratului de acoperire a suprafeței tratate sau pentru suprafețele în contact cu pielea și membranele mucoase.

- 5- Aruncați șervețelul
- 6- Repetați operația dacă este necesar

• PROPRIETATI DEZINFECTANTE

Activitate	Standarde	Timp de contact*
Bactericid	EN 13727	2 min. (cc) / 5 min. (cm)
	EN 1276	5 min (cm)
	EN 13697	5 min (cm)
	EN 14561	5 min. (cc si cm) 5 min.
Levuricid	EN 13624	(cc si cm) 5 min (cm)
	EN 1650	5 min (cm)
	EN 13697	5 min. (cc) / 10 min. (cm)
	EN 14562	
Fungicid	EN13624	5 min. (cc) / 10 min. (cm)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (cm)
	EN 14476 <i>Murine Norovirus</i>	2 min (cc) si 5 min (cm)
Virucid	EN 14476 <i>Adenovirus</i>	5 min (cc) si 10 min (cm) 5
	EN 14476 <i>Poliovirus</i>	min (cc) si 10 min (cm) 10
	EN 14476 <i>Active on Rotavirus</i>	min (cm)
Tuberculocid	EN14348 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 min (cc) si 10 min (cm)
	EN 14563 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 min (cc)
Micobactericid	EN14348 <i>Mycobacterium avium</i>	10 minute (cc)
Sporicid	EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i>	10 min (cc)
	EN 17126 <i>Bacillus cereus</i>	15 min (cc)
	EN 13704 <i>Clostridium diffi</i>	15 min (cm)

*Tests carried out in Clean conditions (cc) and/or Dirty conditions (dc)

• PRECAUTII LA UTILIZARE

Vezi Fisa cu Date de Securitate (FDS 231M)

• CARACTERISTICI

- Aspect: **Fluid lichid**
- pH: **7**

• COMPOSITION

- Surfactant amphoteric
- Soluție hidroalcoolică de alchilamină
- Excipienti

• AMBALAJ

Cutie cu 6 flacoane de 1Lref. **23140M57**

Cutie cu 4 x bidon 5 Lref. **23150M**



Produc periculos-Urmați precauțiile de utilizare. Citiți eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Disp. med. clasa IIb.