

exeol GTA 2%

Dezinfectant de nivel înalt

► Soluție gata de utilizare pe bază de glutaraldehidă pentru dezinfecția finală prin imersie a dispozitivelor medicale sensibile la căldură, invazive și neinvazive, reutilizabile, semi-critice și critice, precurățate.

- Soluție gata de utilizare fără activator.
- Verificarea validității băii cu o bandă de testare (pentru măsurarea nivelului de glutaraldehidă).
- Putere de umezire fără efect de spumare.
- Timp de contact de la 15 minute.
- Activ pe spori of *Clostridium difficile*.



INSTRUMENTE ENDOSCOPIE

⊕ PRODUS



BUNE PRACTICI



Instrucțiuni de utilizare

- exeol GTA 2% este gata de utilizare.
 - exeol GTA 2% se utilizează nediluat pe un dispozitiv medical curățat în prealabil.
 - exeol GTA 2% poate fi utilizat până la maximum 30 zile.
- Verificați în mod regulat valabilitatea băii folosind benzile de test exeol strips GTA 2%.

Înainte de a utiliza exeol GTA 2%, efectuați o pre-curățare sau o curățare mecanică completă și o clătire intermediară a dispozitivelor medicale de tratat.

Când utilizați pentru prima dată, îndepărtați inelul de protecție înainte de a deșuruba capacul.

1. Deșurubați capacul recipientului și transferați conținutul în rezervorul de înmuiere. Închideți recipientul după utilizare.

2. Deschideți și dezasamblați dispozitivele medicale și puneți-le în soluție, asigurându-vă că sunt complet scufundate. Asigurați-vă că sunt irigate toate canalele după caz. Acoperiți rezervorul de înmuiere.

3. Timp de contact: de la 15 min. în funcție de spectrul de activitate cerut.

4. Clătiți bine cu apă sterilă sau filtrată (0,2 μm) înainte de reutilizare.

5. Înainte de depozitare, uscați dispozitivul folosind aer medical pe o suprafață uscată curățată înainte.

exeol strips GTA 2%:

1. Scufundați benzile de control exeol GTA 2% timp de 1 secundă în exeol GTA 2%.
2. Agitați imediat banda ușor pentru a îndepărta excesul de lichid.
3. La exact 15 secunde după îndepărtarea exeol GTA 2%, observați culoarea zonei de testare și comparați-o cu imaginile de referință de pe ambalaj.

Benzile exeol GTA 2% sunt 100% sensibile și specifice atunci când sunt respectate instrucțiunile de utilizare.

DM clasa IIb

Marcaj CE obținut în 2023



exeol GTA 2%

Dezinfectant de nivel înalt

Proprietăți microbiologice

Condiții de curățenie, gata de utilizare, 20 °C:

	TESTE	MICRO-ORGANISME	TIMP DE CONTACT
Bactericid	EN 13727 EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	10 min.
Fungicid	EN 13624 EN 14562	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>	10 min.
Tuberculocid	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	10 min.
Micobactericid	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i>	15 min.
Virucid	EN 14476 EN 17111	<i>Poliovirus, Adenovirus, Norovirus</i> <i>Adenovirus, Norovirus</i>	10 min.
Sporicid împotriva <i>Clostridium difficile</i>	EN 17126	<i>Clostridium difficile</i>	30 min.
Sporicidal	EN 17126	<i>Bacillus cereus, Bacillus subtilis</i>	90 min.

Prezentare comercială

- Cutie 4 x 5L: EXS0092
- Tub cu 100 benzi de testare exeol strips GTA 2%: AC0174



Compoziție	Caracteristici	Precauții
Glutaraldehidă 2% și excipienți.	<ul style="list-style-type: none">• pH: 4.8 - 5.2• Parfum: Neparfumat• Culoare: Verde	Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. UFI: 7E59-2OCR-EOOS-PYX6



PERICOL

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

FABRICAT ÎN FRANȚA

 Sodel
190 rue Rene Barthelemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol

A SODEL DIVISION